



TYR


Bruksanvisning

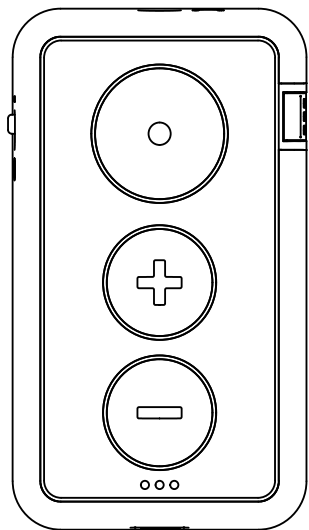

Vad finns i boxen?

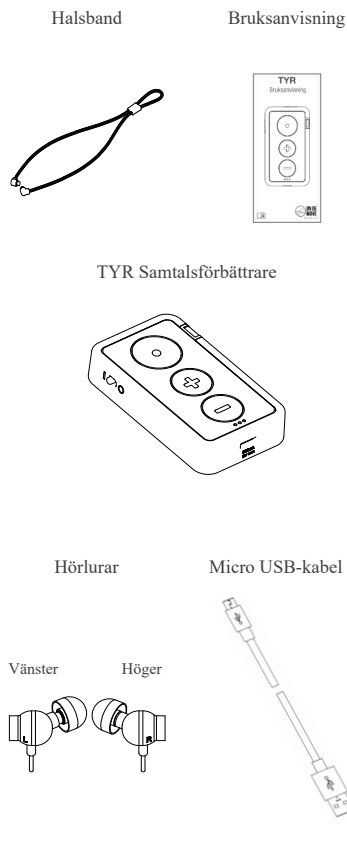


Produktöversikt

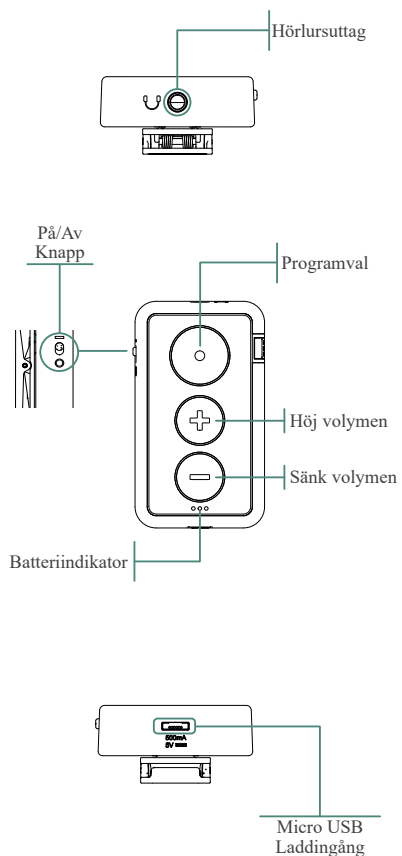

Kom igång


1. Ladda TYR

Kontrollera att TYR är avstängd.
Anslut den lilla änden av USB-kabeln till USB-porten på undersidan av TYR.
Anslut den andra änden till en USB-A strömförsörjning.
TYR är fulladdad efter cirka 1,5 timma och klar att användas.

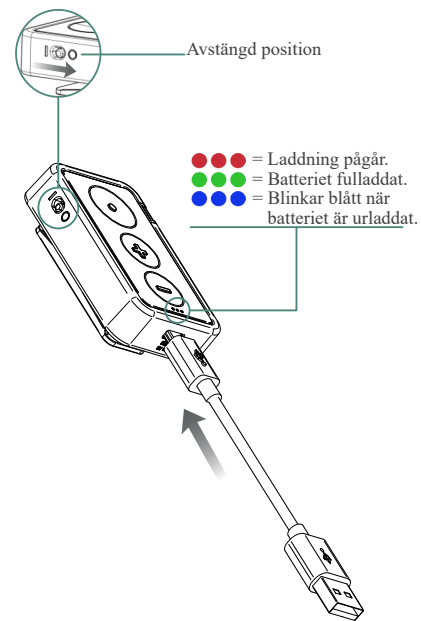


2. Anslut hörlurarna

Anslut medföljande hörlurar till hörlursuttaget på TYR.

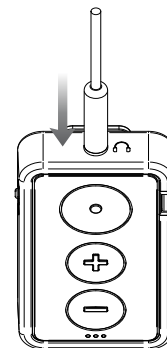

3. Starta TYR

Skjut upp strömbrytaren för att starta enheten.
Batteriindikatorn lyser konstant blått.

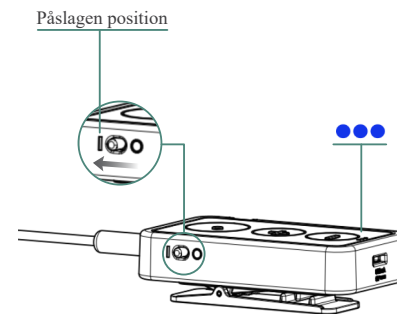

Tillverkad av:
OnDeMove AB
Fiskaregatan 17
302 90 Halmstad
Sweden




www.ondemove.eu


4. Bära TYR

Du kan använda antingen det roterbara clipset eller halsbandet för att bära TYR.
Se till att TYR inte täcks över av kläder mm.

- A. Använd det roterbara clipset för att fästa TYR på kläderna.

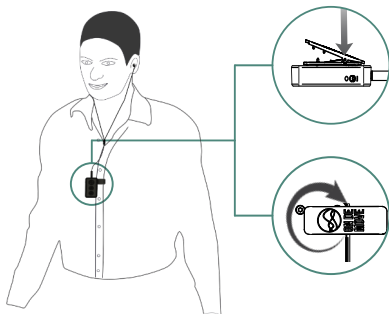


- B. Använd det medföljande halsbandet för att hänga TYR runt halsen.

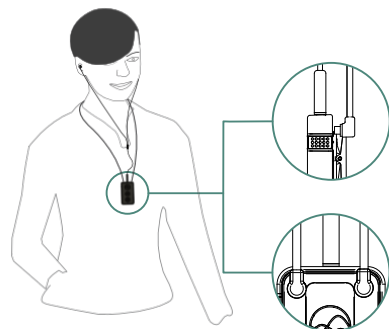


5. Sätt i hörlurarna

Placera de höger- och vänstermarkerade hörlurarna i respektive öra.

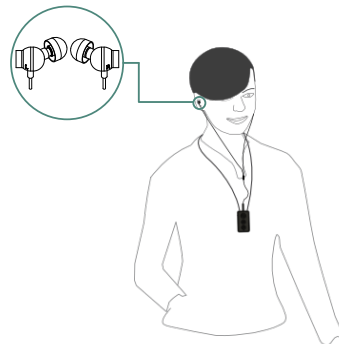

6. Justera volymen

Använd volymknapparna (+) och (-) för att ställa in volymen till en lagom ljudnivå.

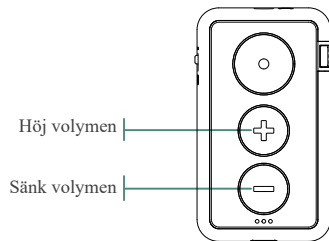


7. Välj program

TYR levereras med tre förkonfigurerade användarprogram.
Genom att klicka på programknappen, stegar du genom programmen:



TYR startar alltid i Program 1 när den slås på.

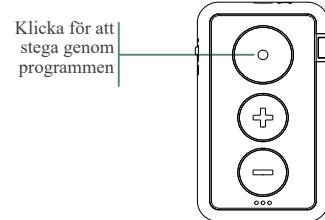


Program 1: Adaptiv miljöigenkänning för små lokaler

Exempelvis: Mindre mötesrum, när man tittar på TV etc.




Program 2: Adaptiv miljöigenkänning för stora lokaler

Exempelvis: Föredrag, konserter, bio, religiösa mötesplatser, konferenser etc.

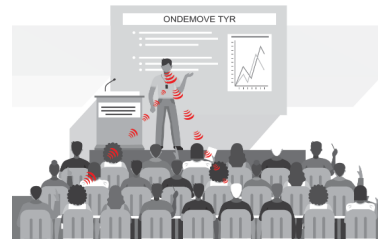

Program 3: För bullriga miljöer

Exempelvis: Restauranger, kaféer etc.

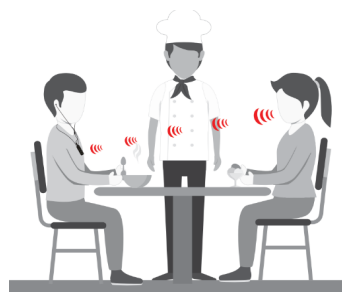

För mer detaljerad information om TYR's funktioner och dess olika program, vänligen besök vår hemsida på: www.ondemove.eu.

8. Teknisk information

Audio bandbredd	12 500 Hz
Max. utnivå	125 dB SPL
Antal användarprogram	3
Max. laddningsström på USB-ingång	
Max. laddningstid	500 mA
Nominell drifttid	2 timmar
Batterityp	40 timmar
Arbetstemperatur	Li-Polymer
Dimensioner LxBxH	-20° till +45 °C
Vikt	70x40x12 mm
	39 gram

9. Varningar

- ⚠ TYR måste användas tillsammans med tillhörande hörlurar. Användning av andra hörlurar leder till sämre prestanda och kan i vissa fall leda till hörselskador.
- ⚠ För att undvika obehagliga ljudupplevelser bör volymen ökas med försiktighet.
- ⚠ TYR ska inte användas medan den laddas.
- ⚠ En trasig TYR ska returneras till ett auktoriserat servicecenter. Försök inte reparera enheten eller komponenterna själv.
- ⚠ Använd endast godkända delar och tillbehör från OnDeMove AB. Ändringar eller modifieringar som inte godkänts av OnDeMove AB upphäver garantin.

10. Symbolförklaringar

CE OnDeMove AB förklarar härmed att detta hörseltillbehör överensstämmer med europeiska myndighetskrav.

♻ Denna produkt innehåller elektronikkomponenter och uppladdningsbart batteri. Återvinning av denna produkt ska göras enligt lokala föreskrifter.

📖 För korrekt användning av denna produkt är det viktigt att du läser denna bruksanvisning innan du använder produkten.